


Idealny zestaw ratunkowy, kompatybilny z każdym systemem implantologicznym dostępnym na rynku!

MegGyver Kit

- Usuwa implanty, łączniki i śruby za pomocą jednego zestawu
- Kompatybilny i wytrzymały
- Prosty i łatwy w użyciu

Unikalna technika Magic Grip firmy MegaGen
Narzędzia zestawu MegGyver skutecznie rozwiązują każdy problem.

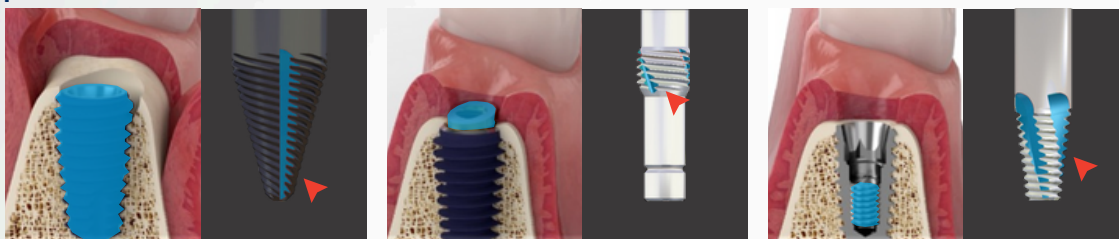

Rozwiązania dla implantów

Rozwiązania dla łączników

Rozwiązania dla śrub



Aby usunąć implant obracaj narzędzie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Aby usunąć łącznik obracaj narzędzie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zapewnia rozwiązanie w trzech krokach. Do dyspozycji są 4 średnice śrub.

kompleksowy zestaw o unikalnych właściwościach, który wyróżnia się na tle dostępnych na rynku alternatyw!

1. Niezawodność, na której możesz polegać.
(MGG: Węgiel tungstenowy / Dawniej: Stal nierdzewna)
2. Maksymalna skuteczność, minimalny czas.
3. Szybkość i skuteczność na najwyższym poziomie.


Implant	Łącznik	Śruba	Porównanie
Pewny chwyt, prosty w obsłudze	Precyzyjna i atraumatyczna ekstrakcja łączników	Precyzyjne i różnorodne dozwijania	MegaGen
Kompatybilność z większością systemów implantologicznych	2 opcje średnic	Stabilny chwyt i pełna kontrola	
Tępe ostrza gwintownika	Skomplikowana obsługa	Nietrwale komponenty	Firma A
Niepełne nacinanie gwintu	-	-	Firma B
Niewystarczająca ilość komponentów	Nieskuteczny chwyt	Nieskuteczny chwyt	Firma C

To takie proste!
Obracaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara


Yes,
MegGyver
Can!

Magic Grip

Precyzja i nowoczesna technologia z funkcją samogwintowania

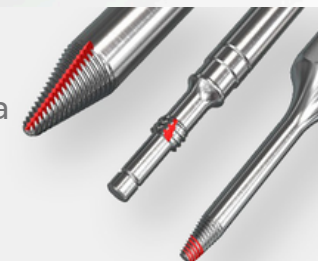

Implant/ Łącznik/ Śruba - pełna kontrola w każdej sytuacji! Bez względu na wyzwanie wszystkie narzędzia w jednym zestawie!

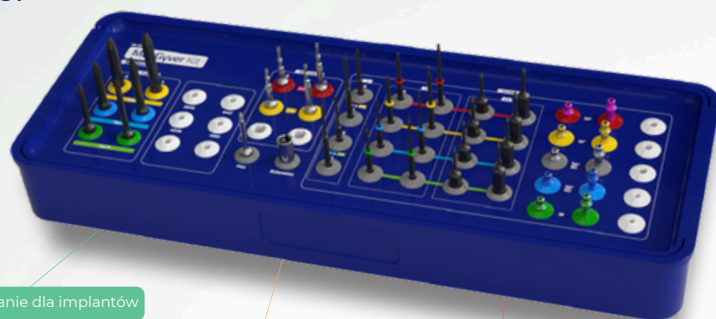

Rozwiązanie dla implantów

Rozwiązanie dla łączników


Rozwiązanie dla śrub

Narzędzia do usuwania śrub




Ekstraktor do śrub

Typ	Długość	Nr katalogowy
M1.4/M1.6	15mm	SS1416S
	25mm	SS1416L
M1.8/M2.0	15mm	SSS
	25mm	SSL

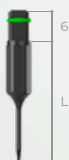

Gwintownik (narzędzie do nacinania gwintu)

Typ	Długość	Nr katalogowy
M1.4	19mm	STDS14
	24mm	STD14
M1.6	19mm	STDS16
	24mm	STD16
M1.8	19mm	STDS18
	24mm	STD18
M2.0	19mm	STDS20
	24mm	STD20

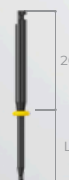

Wiertło rewersyjne (wiertło do wykręcania)

Typ	Długość	Nr katalogowy
M1.4	14mm	RDS14
	19mm	RDL14
M1.6	14mm	RDS16
	19mm	RDL16
M1.8	14mm	RDS18
	19mm	RDL18
M2.0	14mm	RDS20
	19mm	RDL20



※ Większość śrub można usunąć za pomocą 4 typów narzędzi w zależności od średnicy.

- Krok 1** W przypadku lekkiego zakleszczenia obracaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara z prędkością 30-50 obr./min.
- Krok 2** Jeśli usunięcie nie powiedzie się na etapie 1, użyj wiertła rewersyjnego, zwiększ prędkość do 2000 obr./min i powtórz procedurę z kroku 1.
- Krok 3** Jeżeli nie uda się usunąć śruby na etapie 2, zastosuj gwintownik.

Narzędzie do wykręcania implantów

Mały

Połączenie poniżej Ø2.5



Regularny

Połączenie Ø2.5 ~ Ø3.2



Kompatybilność z większością systemów implantologicznych.

Szeroki


Połączenie Ø3.2 ~ Ø4.4



Odsłonięcie implantu – Za pomocą trepanu usuń odpowiednią ilość kości wokół implantu, aż odsłoni się przynajmniej 1/3 jego wierzchołka.

Poluzowanie implantu – Użyj małego ekstraktora aby osłabić zakotwiczenie implantu, wykonując, wykonując kontrolowane ruchy boczne (lateralne).

Wykręcanie implantu – Obracaj ekstraktor zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby bezpiecznie usunąć implant, minimalizując uszkodzenie tkanek kostnych.

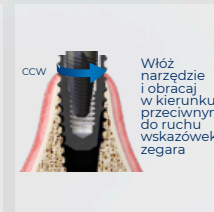

Ekstraktor do implantów *Produkt dostępny również oddzielnie

Typ	Długość	Nr katalogowy
Mały	19mm	*ITR25U
	24mm	ITR25S
	29mm	ITR25L
Regularny	19mm	*ITR35U
	24mm	ITR35S
	29mm	ITR35L
Szeroki	19mm	*ITR45U
	24mm	ITR45S
	29mm	ITR45L

Wiertło Trepanowe *Produkt dostępny również oddzielnie

I.D	O.D	Nr katalogowy
Ø3.9	Ø4.5	*TANTBL3945
Ø4.1	Ø4.7	*TANTBL4147
Ø4.3	Ø4.9	*TANTBL4349
Ø4.5	Ø5.1	*TANTBL4551
Ø5.0	Ø6.0	*TANTBL5060
Ø6.0	Ø7.0	*TANTBL6070


Narzędzia do usuwania łączników



Ekstraktor do łączników

Typ	Długość	Nr katalogowy
M1.8	19mm	ARS18
	24mm	ARL18
M2.0	19mm	ARS20
	24mm	ARL20


*Produkt dostępny również oddzielnie

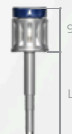

Klucz do wypychania łącznika z implantu


Typ	Długość	Nr katalogowy
M1.6	17.5mm	*TANMRD18
	25mm	*TANMRD25

*Produkt dostępny również oddzielnie

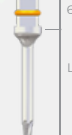

Ekstraktor gniazda łącznika (heksa)

Typ	Długość	Nr katalogowy
Hex 1.2	16mm	C*HSS
	21mm	HSL

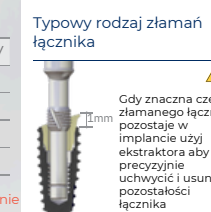

Usunięcie nie jest możliwe ze względu na zniekształcone gniazdo (heks)

